



Policlinico di Monza

Istituto ad Alta Specializzazione

LABORATORIO ANALISI

851.01.07.06

Modalita' di raccolta campioni biologici

ESAME CULTURALE DEL TAMPONE FARINGEO

CONDIZIONI PRELIMINARI

1. Questo esame permette di identificare i microrganismi responsabili della sua sintomatologia oppure del suo stato di portatore.
2. Sospendere la terapia antibiotica per circa 3-4 giorni precedenti l'esame.
3. Presentarsi a digiuno, senza aver lavato i denti o usato colluttori orali.

CONTENITORE PER LA RACCOLTA:

Tampone sterile con terreno di trasporto

MODALITA' DI RACCOLTA :

- Piegare la testa all'indietro e aprire bene la bocca;
- rivolgere il paziente verso una sorgente appropriata di illuminazione, per visualizzare la sede ove operare il prelievo
- se necessario, usare un abbassalingua sterile e premere delicatamente la lingua;
- inserire il tampone tra i pilastri tonsillari e dietro l'ugola e strofinare le zone tonsillari e qualsiasi sede con segno di flogosi;
- evitare il contatto del tampone con la lingua, le guance, il velopendolo, le arcate dentarie e le pareti laterali del cavo orale
- evitare che il tampone si contamini con la saliva.
- riporre il tampone nel contenitore con il terreno di trasporto

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il campione deve essere prelevato in sede ambulatoriale e consegnato al laboratorio entro 3 ore ma può essere conservato per un massimo di 24 ore a temperatura ambiente

CRITERI DI NON ACCETTAZIONE :

Non vengono accettati campioni pervenuti in contenitore :

- non sterile
- non integro
- non perfettamente chiuso con fuoriuscita di materiale (non sono più garantite le condizioni di sterilità)